

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Meliseptol Wipes ultra

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion, Farblose Tücher mit charakteristischem Geruch.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kann bei Augenkontakt zu Reizungen führen. Kann die Schleimhäute reizen.
Nicht ins Grundwasser oder Oberflächengewässer gelangen lassen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: 112
Verschütten: Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

ERSTE HILFE



Arzt:
Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mindestens 15 Minuten spülen. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Arzt hinzuziehen.
Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung ablegen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 09.01.2019

Nr.: 00056-0318

Datum:

Unterschrift: