

Schnelldesinfektionsmittel

DESCOCEPT AF LEMON

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- Gebrauchsfertig
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Mit frischem Lemon-Duft



Produktbeschreibung

DESCOCEPT AF LEMON ist ein gebrauchsfertiges, aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol. DESCOCEPT AF LEMON hat einen angenehmen, frischen Lemon-Duft. Das Produkt verfügt über eine umfangreiche Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren sowie über hervorragende Reinigungseigenschaften. DESCOCEPT AF LEMON ist geeignet zur Flächen-desinfektion für Bereiche, in denen eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten.

Anwendung

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Wirkspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min	5 min
Bakterien und Hefen						
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			●	
	VAH / EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung				●
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		●		
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung			●	
Viren						
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	●			
	EN 14476	niedrige Belastung	●			
		niedrige Belastung	●			
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung				●
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV			●		

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Anwendungshinweise

DESCOCEPT AF LEMON kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Einsatz in Vliestuchspendersystemen: DESCOCEPT AF LEMON eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten

Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den ONE SYSTEM-Vliestuchspendersystemen oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO/ECO WIPES-Vliestuchspendersystemen.



DESCOCEPT AF LEMON

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

Ergänzende Prüfergebnisse			30 s	1 min
bakterizid	EN 1040		•	
	EN 1276	niedrige Belastung		•
	EN 13727	niedrige Belastung	•	
		hohe Belastung		•
	EN 13697	niedrige Belastung		•
		hohe Belastung		•
levurozid (Candida albicans)	EN 1275		•	
	EN 1650	niedrige Belastung		•
	EN 13624	niedrige Belastung		•
		hohe Belastung		•
	EN 13697	niedrige Belastung		•
		hohe Belastung		•

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
42 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid. Enthält Duftstoffe.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT AF LEMON	Flasche	1 L	10	00-311L-010	01899267
	Kanister	5 L	3	00-311L-050	01899296
	Kanister	10 L	1	00-311L-100	01899391

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. www.schumacher-online.com